

Renser til endoskopkanaler

BRUGSANVISNING

Beskrivelse og tilsigtet formål

NEUTRA-FLUSH™

NEUTRA-FLUSH™ er et praktisk, pladsbesparende sæt til forrensning, der indeholder et neutralt, lavtskummende rengøringsmiddel beregnet til postoperative og indledende skylning og aftørring af et endoskop ved sengelejet.

Brugsanvisning

NEUTRA-FLUSH™ er beregnet til brug umiddelbart efter endoskopiprocedurer for at forhindre tørring af organisk affaldsstoffer på et endoskop.

Udgaver

NEUTRA-FLUSH™

RESERVEDELSNUMMER	BESKRIVELSE	ENHEDER PR. KASSE
105102 / 105154	NEUTRA-FLUSH™ 200ml med skopformet svamp	36
105103 / 105155	NEUTRA-FLUSH™ 300ml med skopformet svamp	27
105104 / 105156	NEUTRA-FLUSH™ 500ml med skopformet svamp	18
100288	Flad svamp (enkelt pakket)	100
105026	Skopformet svamp (enkelt pakket)	75

Tekniske specifikationer

Mål: NEUTRA-FLUSH™

	NEUTRA-FLUSH™ 200ml sæt	NEUTRA-FLUSH™ 300ml sæt	NEUTRA-FLUSH™ 500ml sæt
Højde:	85mm	85mm	122mm
Diameter:	95mm	95mm	95mm
Vægt:	225gm	325gm	525gm

Brugsvejledning til NEUTRA-FLUSH™

I overensstemmelse med retningslinjerne for forrensning af endoskopet skal følgende trin udføres umiddelbart efter endoskopiproceduren:






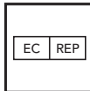







1. Sørg for, at NEUTRA-FLUSH™-beholderen er placeret på en flad overflade for at lette en effektiv aspiration. Bryd garantiforsegling, og fjern låget.
2. Fjern svampen, så overskydende væske kan løbe fra svampen og tilbage ned i beholderen før brug.
3. Brug svampen til at tørre endoskopets kontrolorgan og indsætningsrør af. Når svampen er brugt, skal den bortskaffes som klinisk affald.
4. Anbring den distale spids af endoskopet i NEUTRA-FLUSH™-beholderen, og opsug væsken gennem endoskopkanalen.
5. Når al væske er opsuget, skal beholderen bortskaffes som klinisk affald.

Advarsler og forholdsregler



- NEUTRA-FLUSH™ er udelukkende beregnet til brug af uddannet sundhedspersonale. Må ikke anvendes af lægfolk.
- Bær altid passende personlige værnemidler (PV) ved håndtering. For yderligere oplysninger om sundhed og sikkerhed, inklusive sikker bortskaffelse, henvises til sikkerhedsdatabladet.
- Hvis garantiforseglingen eller posen er ødelagt, må produktet ikke anvendes og skal bortskaffes.
- NEUTRA-FLUSH™ er beregnet til engangsbrug. Undlad af genbruge eventuelle dele af NEUTRA-FLUSH™-systemet. Genbrug udgør en risiko for krydsinfektion af patienten.
- NEUTRA-FLUSH™ er ikke et desinfektionsmiddel. Udstyret skal viderebehandles i overensstemmelse med endoskopfabrikantens instruktioner til bearbejdning og med de lokale regler/procedurer.
- Hvis du er opmærksom på alvorlige hændelser i forbindelse med NEUTRA-FLUSH™, skal du sørge for, at hændelsen rapporteres til Cantel, som fabrikant af udstyret og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren/patienten er bosat.
- Kontakt fabrikanten af endoskopet for at sikre kompatibilitet med NEUTRA-FLUSH™.

Forklaring på symboler

	Fabrikant.		Bruges inden.		Katalog Nummer.		Engangsbrug. Må ikke genbruges.
	Fremstillings dato.		Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab.		Se brugsanvisning.		Batchkode.
	CE-mærke.		Advarselsklærings.		Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.		Temperaturgrænse.
	Medicinsk udstyr.						

Kontaktoplysninger

For bestilling eller yderligere oplysninger bedes du kontakte os her:

 **Cantel (UK) Ltd**
Campfield Road, Shoeburyness, Essex SS3 9BX UK.
Telefon: +44 (0)1702 291878
Fax: +44 (0)1702 290013
E-mail: info@cantelmedical.co.uk
Websted: www.cantelmedical.co.uk

Cantel France SAS
3 Rue Du Pre Ferme, 31200 Toulouse, Frankrig.
Telefon: +335 61 245 275
Fax: +335 61 247 001
E-mail: info@cantelmedical.fr
Websted: www.cantelmedical.eu/fr

Medivators BV
Amerikalaan 110, 6199 AE Maastricht, Holland.
Telefon: +31 (0)45 5471471
Fax: +31 (0)45 5429695
E-mail: CSNL@medivators.com
Websted: www.cantelmedical.eu/nl

 **Cantel Medical (Italy) S.r.l.**
Via Laurentina, 169, 00071 Pomezia (RM), Italien.
Telefon: +39 06 9145 399
Fax: +39 06 9146 099
E-mail: info@cantelmedical.it
Websted: www.cantelmedical.eu/it

Cantel (Germany) GmbH
Messerschmittstr. 11, 86368 Gersthofen, Tyskland.
Telefon: +49 211 9098 0750
Fax: +49 211 9098 0752
E-mail: CSDE@cantelmedical.de
Websted: www.cantelmedical.eu/de



700414 Udgave 3 03/2021

© 2021 Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation er beskyttet af copyright. Kopiering, distribution eller brug af denne publikation er forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Cantel (UK). Cantel (UK) forbeholder sig retten til at ændre de specifikationer, der er beskrevet heri, uden at der er pligt til forudgående varsel. Kontakt din Cantel-repræsentant for at få yderligere oplysninger.

NEUTRA-FLUSH™ er et varemærke tilhørende Cantel (UK) Ltd.