

Generelt om forklæder

Farver


Alle varer (side 4-23) kan leveres i de viste farver.



Kantbånd

Vallgfri kantbåndsfarve uden merpris.
Husk at oplyse farven ved ordreafgivelse.

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1. pink | 8. bronze |
| 2. violet | 9. met.green |
| 3. grøn | 10. navy |
| 4. rød | 11. gul |
| 5. burgundy | 12. hvid-blå |
| 6. sort | 13. hvid-rød |
| 7. purple | 14. hvid-burgundy |

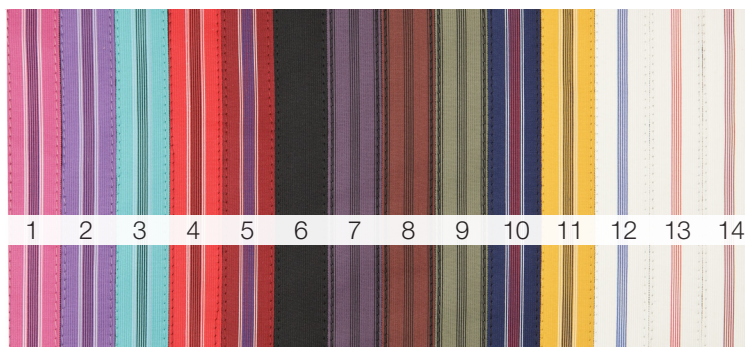

Personlig tilpasning

Alle forklæder kan tilpasses individuelt efter behov mod et mindre pristillæg.
Der er bl.a. mulighed for følgende ændringer.

- Større/mindre ærmegab
- Større overlap på Wrap-modellerne
- Justering af bæltehøjde på Easy-Wrap™ og Split-Wrap™
- Speciallængde

Opbevaring af blybeskyttelse

Det er vigtigt, at blybeskyttelse opbevares korrekt. Korrekt opbevaring af blybeskyttelse forlænger levetiden og forhindrer, at det beskyttende materiale inde i forklædet bliver beskadiget. I dette katalog findes både opbevaringsstativer på hjul og bøjler til vægmontering (side 26-28).

Broderi

Ønsker man et personligt forklæde, er det muligt at få broderet navn på forklædet. Broderiet sættes på forklædets lomme. Vælges et forklæde uden lomme, vil broderiet blive sat direkte på stoffet. Det er også muligt at vælge forskellige motiver.

Broderi på forklædet er med til at forlænge levetiden på forklædet, da brugeren af et personligt forklæde ofte vil være mere påpasselig med at få hængt forklædet op efter brug.

Broderi tilbydes mod et mindre pristillæg.




Størrelser

Det er vigtigt at vælge den rigtige størrelse forklæde af hensyn til komfort og sikkerhed.

	XS	S	M	L	XL	XXL
Bryst	74-82	82-90	90-98	98-107	107-119	119-151
Talje	58-66	66-74	74-82	82-91	91-103	103-115
Hofte	82-90	90-98	98-106	106-115	115-125	125-135

Målene i målskemaet er vejledende.

Kontakt Santax Medico, hvis du er i tvivl om, hvilken størrelse du skal bruge.

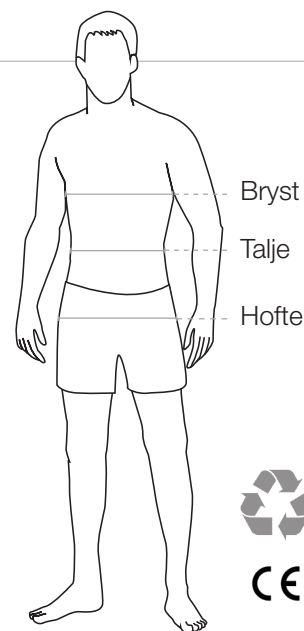

Rengøring

Ydermaterialet på alle forklæder indeholder polyurethan, som er meget nemt at rengøre. Vi anbefaler rengøring med sæbeopløsning, men andre rengøringsmidler som "hospitalssprit" kan også anvendes.

Vi henviser til den medfølgende rengøringsanvisning. Ved tvivlstilfælde kan Santax Medico kontaktes.



HOVEDKONTOR
Santax Medico
Bredskifte Allé 11
8210 Aarhus V

REGIONSKONTOR
København:
Produktionsvej 3
2600 Glostrup

Tlf. 70 13 30 20
Fax 70 13 30 22
Service 70 13 30 10

Info@santax.com
service@santax.com
salg@santax.com

Santax Medico
SANTAX NORDIC GROUP

www.santax.com